

# **NYA** **seca wireless produkter**



Under 2011 kommer flera nya  
seca 360° wireless produkter  
att presenteras.

# NYA

## Pelarovågen seca 704, 360° wireless.

**Förberedd för framtiden redan idag**



Som en av de första i världen och definitivt i Sverige får ni nu den nya versionen av:  
**seca 704 pelarovåg, 360° wireless**

**Självklart utan någon som helst extra kostnad.**

**seca 704, 360° wireless**

**FÖRBEREDD FÖR FRAMTIDEN REDAN IDAG**



**Art. nr. 7013**

**Vad menas med att vågen är förberedd för framtiden redan idag?**

Jo, pelarvågen **seca 704 wireless** har flera inbyggda funktioner, t.ex. möjlighet till utskrift av vikten. Det smarta är att du bara aktiverar de funktioner som du vill använda. Vågen är förberedd för framtiden redan idag.

**Vilka grundfunktioner finns det?**

- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om patienten först och läsa av vikten sedan.
- **En nyhet** är att vågen numera också har *Mor/Barn funktion*, så du kan väga ett barn i famnen på en vuxen.
- Vågen har dämpning så att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Praktiskt om barnet sprattlar.
- BMI
- Med Pre-TARA-funktionen fungerar så att du kan dra av en förinställd, redan lagrad vikt från patientens vikt. T.ex. en ungefärlig klädvikt.
- Vågen stänger automatiskt av sig vid batteridrift.

## seca 704, wireless

### Vilka extra funktioner får jag?


- Du kan aktivera en automatisk HOLD-funktion.
- För att snabbt veta när auto-HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att patienter som inte kan stå riktigt stilla fördröjer viktvisningen.
- Du kan aktivera automatisk radering av lagrade värden. Då är du t.ex. säker på att BMI alltid beräknats på rätt längd.
- Du kan aktivera en trådlös skriftfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto. Då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så kan du placera skrivaren där du tycker att den står bäst.
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som hjälper till med analys av vikten och slutligen registrerar vikten i den elektroniskapatientjournalen.

### FAKTA:

Kapacitet	250kg
Gradering	100g
Mått (BxHxD)	36 x 93 x 52cm
Fotplattan (BxHxD)	33,5 x 8 x 34,5cm
Vikt	14,9kg

Vågen drivs med vanliga AA batterier. När den kopplats till en trådlös seca skrivare, eller seca dataprogram, rekommenderas att vågen drivs via en seca nätadapter.

### TILLBEHÖR:

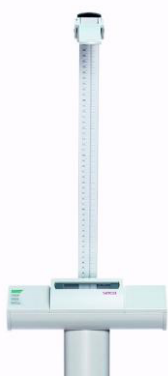

**seca 220**  
längdmätare



**seca 465/seca 466**  
skrivare för termopapper  
eller termopapper/etikett



**seca nätadapter**

**CE**: **seca 704 wireless** uppfyller direktiven :  
**93/42/EEG, MDD** och **90/384/EEG, Klass III**  
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)