


Bruksanvisning för Maxin högeffektnebulisator



Lyft av överdelen från fotflaskan med en lätt vridning. Inga gängor finns. Dimbildaren ska hanteras varsamt.

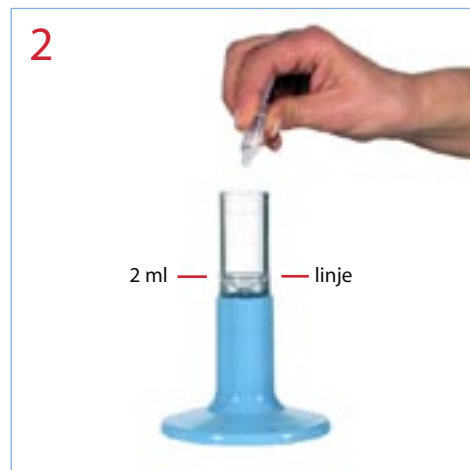

Fyll inhalationsvätska i fotflaskan enligt ordination. Fotflaskans linje markerar 2 ml. Maximal fyllnadsvolym är 5 ml.



Sätt tillbaka överdelen på fotflaskan. Sugröret ska nå ner i inhalationsvätskan annars kan dimbildaren suga luft.



Trä dospåsen på det smala röret. Montera munstycket med utandningshålet nedåt. Munstycket får inte plockas isär!

Drivkälla: Drivpaket 5 bar, (luft, AGA)



Tryck in snabbkopplingen i uttaget. Kranen öppnas ett varv moturs och stängs medurs. Snabbkopplingen kan sitta kvar mellan inhalationerna.

Drivkälla: centralt gasuttag (sjukhus)



Centralt uttag: – Tryck in snabbkopplingen i uttaget. Vid uppehåll: – Ta loss kopplingen från uttaget eller stäng av med speciellt handreglage (extra tillbehör).

Inhalation



Andas både in och ut genom munstycket. Andetagen inleds med ren aerosol utan knapptryckning. Dospåsen behöver inte fyllas helt mellan andetagen.

Rengöring av dimbildare efter inhalation



Dimbildaren ska rengöras efter inhalation!
 • Sätt ner sugröret i vatten med drivgas på.
 • Låt det blåsa vattendimma i 4-5 sekunder, lyft upp och låt den blåsa enbart luft lika länge.